


# MODE D'EMPLOI SIMPLIFIÉ

## TIRE-LAIT NEPTUN

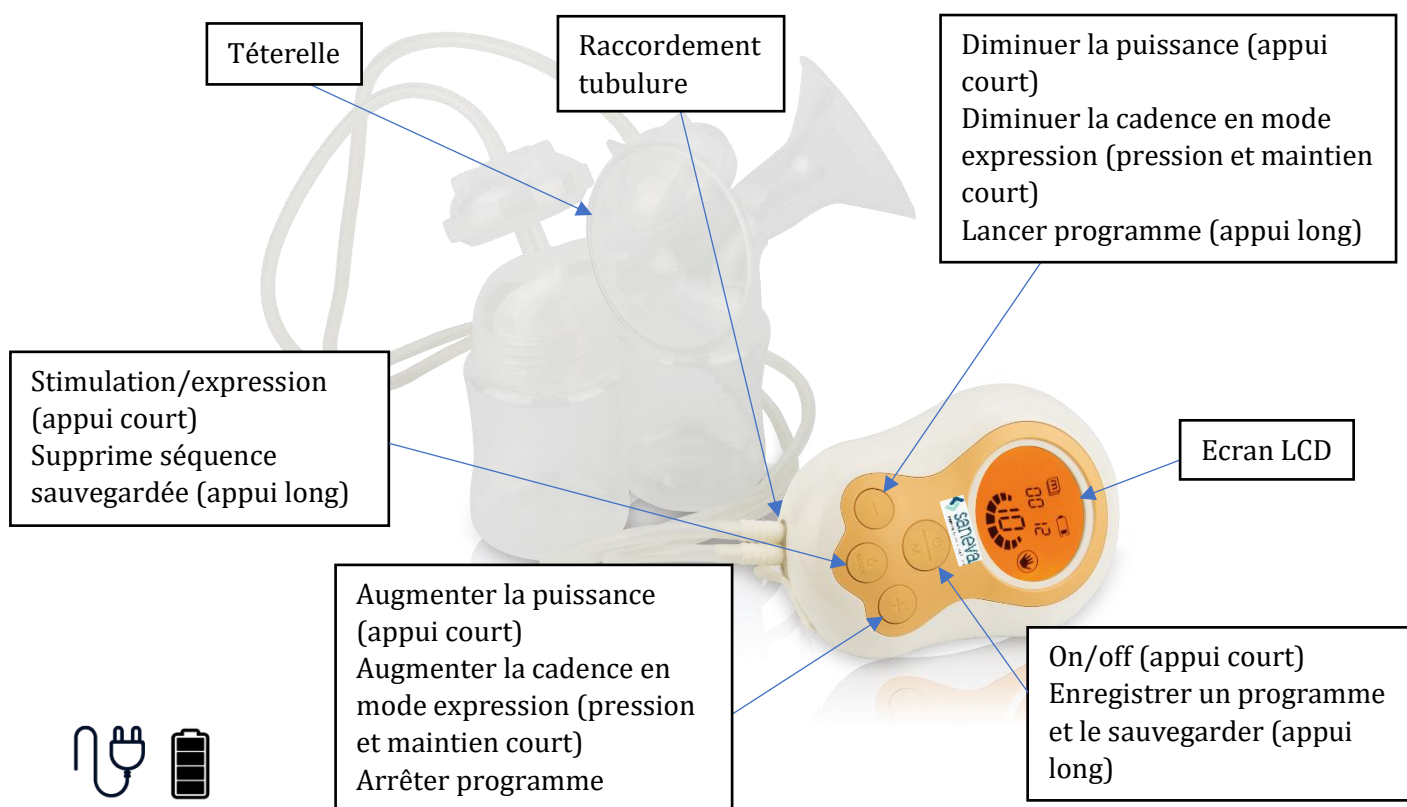

- ➔ Monter le ou les kits de pompage.  
Attention : si vous utilisez le tire-lait en simple pompage, ne pas oublier de boucher une des arrivées d'air.
- ➔ Placer la téterelle sur la poitrine de manière que le mamelon soit bien centré.
- ➔ Appuyer sur le bouton on/off.
- ➔ Choisir le mode stimulation, régler la puissance d'aspiration.
- ➔ Au bout de deux minutes, passer sur le mode expression et régler à nouveau la puissance. Il est possible pendant l'expression de régler également la cadence.
- ➔ Arrêter l'appareil au bout de 15-20 minutes en appuyant sur le bouton on/off.
- ➔ En cas d'engorgement, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être la même, contactez-nous afin d'être guidée.
- ➔ Pour enregistrer un programme, maintenir une pression longue au démarrage de l'appareil sur le bouton on/off jusqu'à l'apparition du symbole « M » clignotant. Appuyer à nouveau à la fin de l'utilisation pour sauvegarder le programme.
- ➔ Vous avez la possibilité de lancer et de stopper le programme à l'aide des boutons « - » et « + ». Pour effacer un programme, maintenir une pression longue sur le bouton « Mode » quelques secondes.

Attention : Si le pompage est douloureux, la puissance est peut-être trop forte ou la taille de la téterelle pas adaptée.